

### Zostavenie:

1. Zložte všetky plastové obaly (nezabudnite na obaly na kolieskach)
2. Postavte chodítko na rovnú podložku
3. Tlačte sedadlo štvorkolky smerom dolu, kým nezačujete jemné klopnutie.
4. Odstráňte pripevnené rukoväte a zasunúť ich do príslušných otvorov. Rukoväte nastavte na potrebnú výšku pomocou päčícypých skrutiek ktoré sú pribalené k štvorkolke.
5. Na bezpečné pripevnenie v ráme musia byť rukoväte zasunuté minimálne 10 cm. Brzdové páčky musia po pritiahnutí smerovať dolu. Ak majú inú polohu, rozmontujte ich a nastavte do požadovanej polohy.
6. Košík si môžete uložiť pod alebo pred sedadlo.
7. Opierku si pripevníte pomocou uzatváracieho kolíka: uistite sa, že kolík je správne umiestnený v príslušnom otvore.

### Používanie chodítka

- Parkovaciú brzdu aktivujete odtlačením čiernej páčky od rukoväte. Pritiahnutím tejto páčky k rukoväti uvoľníte parkovaciú brzdu a aktivujete aj príbrzdovaciú brzdu, ktorá slúži na spomaľovanie chodítka pri chôdzi tak aby poskytovalo dobrú oporu.
- Pre uľahčenie prepravy môžete chodítko zasa zložiť.

### Bezpečnostné pokyny

Chodítko používajte pokiaľ možno na rovných plochách a snažte sa vyhnúť všetkým nerovnostiam ako sú vpuste do kanálov a podobne. Za mokra a na snehu sa brzdám znižuje účinnosť a hrozí nebezpečenstvo úrazu aj poškodenia chodítka. V extrémnych poveternostných podmienkach je lepšie chodítko nepoužívať.

Brzdy sú nastaviteľné a pre bezpečnosť prevádzky je nutné kontrolovať, či sú nastavené obidve rovnako.

Chodítko sa nesmie preťažovať - maximálna možná hmotnosť prepravovaných predmetov je 10 kg a maximálne možná hmotnosť užívateľa je 110 kg.

### Údržba:

Chodítko čistite jemnými saponátovými prostriedkami.

### Materiál:

Rám - oceľové rúrky

Držadlá - PVC

Sedadlo - Umelá koža

### Technické údaje:

Hmotnosť 8 kg

Výška sedačky od zeme 55,5 cm

Rozmer sedadla 33 x 35,5 cm

Nosnosť 110 kg

Nastaviteľná výška rukovätí od 80 do 92 cm

Celková šírka 62 cm

Celková hĺbka 68 cm

Vnútorňá šírka 45,5 cm