



## Mechanická polohovacia posteľ pojazdná UNIZDRAV



Keď obdržíte posteľ, zodpovednosť za jej správne používanie s náležitou starostlivosťou prechádza na vás. Preto si pozorne prečítajte priložené pokyny a oboznámte sa s ich technickým vybavením, manipuláciou a používaním všetkých funkcií.

**Tento návod na použitie vás oboznámi s funkciami nemocničnej postele a navyše popisuje:**

- ako nastaviť nemocničnú posteľ,
- ako ovládať nemocničnú posteľ,
- ako sa starať o nemocničnú posteľ a vykonávať jej údržbu.

### **Mechanická posteľ s dvoma funkciami polohovania**

Nemocničné postele popísané v tomto návode sú skonštruované podľa nasledujúcich štandardov: ISO, CE.

#### **Určené použitie**

Táto posteľ je navrhnutá na polohovanie a prepravu pacientov, ako pomôcka pri liečbe a zmiernení chorôb alebo pri zranení či postihnutí.

#### **Funkcie**



Funkcia zdvíhania opierky chrbta



Funkcia zdvíhania nožnej časti

#### **Záhlavie, nožné čelo**

Štandardná verzia postele je vybavená odnímateľnými záhlavím a nožným čelom, aby sa poskytla lepšia prístupnosť k pacientovi. Záhlavie a nožné čelo sú vyrobené z modrej fólie z polypropylénu pomocou metódy vstrekovania.



#### **Bočnice**

Posteľ je vybavená bezpečnostnými bočnými zábranami, ktoré chránia pacienta pred neúmyselným vypadnutím z postele. Bočnice sú vyrobené z nerezovej ocele a hliníkovej zliatiny.

**!! Riziko zachytenia a pomliaždenia !!**

✘ **Pri spúšťaní bezpečnostných bočníc existuje riziko zachytenia alebo rozdrvenia končatín pacienta.**

✘ **Pred spustením bezpečnostných bočníc sa uistite, že končatiny pacienta nie sú v dráhe bezpečnostných zabradlí.**

#### **Kolieska**

Posteľ je vybavená štyrmi uzamykateľnými kolieskami, ktoré je možné ovládať samostatne. Kolesá majú samostatnú brzdu s priemerom 125 mm a jednostranným tlmením.

## UPOZORNENIE

Vždy použite brzdy, keď posteľ nie je v pohybe alebo keď je pacient v posteli bez dozoru.

### Podvozok

Podvozok tvoria oceľové profily, ošetrované elektronickou práškovou farbou. Všetky povrchy sú bezpečné pre kontakt s pokožkou. Matrac je rozdelený na chrbtovú časť, sedáciu časť a nožnú časť. Chrbtová a nožná časť sa dajú nastaviť samostatne.

### Riadiaci systém

Na konci postele sú nainštalované oceľové otočné páky, ktoré slúžia na ovládanie zdvihu chrbta a ohýbanie nožnej časti.

### Parametre

Celková dĺžka postele	208 cm
Celková šírka postele	96 cm
Celková výška postele	50 cm
Dĺžka ležiacej časti	196 cm
Šírka ležiacej časti	90 cm
Uhol naklápania chrbta	0-70°
Uhol naklápania nohy	0-30°
Nosnosť	260kg

### Upozornenia

- Táto posteľ môže byť prevádzkovaná iba osobami, ktoré dostali inštrukcie od prevádzkovateľa o jej bezpečnej prevádzke. Ak posteľ zmení majiteľa, musí byť spolu s ňou predaný aj návod na použitie.
- Po AKÝKOĽVEK úpravách, opravách alebo servisných prácach a PRED použitím sa uistite, že všetok prídavný materiál je pevne utiahnutý - inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Ak máte podozrenie na akékoľvek poškodenie alebo poruchu, ihneď vyberte posteľ z prevádzky, kým nebude opravená alebo vymenená poškodená súčiastka!
- Táto posteľ nesmie byť upravovaná bez povolenia výrobcu.
- Efektívna a bezpečná prevádzka spolu s maximálnou ochranou pacientov môže byť zaručená iba vtedy, ak sa používa originálne príslušenstvo navrhnuté pre príslušný model postele

### Údržba, čistenie a kontrola

Údržbové a čistiace postupy by sa mali vykonávať aspoň raz ročne alebo podľa potreby. Odporúčame čistiť jednotku čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nepoužívajte nadmerné množstvo tekutiny ani drsné čistiace prostriedky.

- Utierajte posteľ dezinfekčným prostriedkom.
- Pred použitím ju nechajte úplne vyschnúť.
- Skontrolujte kolieska, aby ste sa uistili, že sú zabrzdené pokiaľ je to potrebné a že sa kolieska pohybujú správne.
- Skontrolujte všetky súčasti postele.
- Vizualne skontrolujte všetky zvárania a praskliny.
- Skontrolujte komponenty plošiny, či nie sú ohnuté alebo poškodené.
- Skontrolujte konce pohonu a jeho montážne hardvérové súčasti či nie sú ohnuté alebo nadmerné opotrebovanie.
- Skontrolujte všetky skrutky a úchyty.