

Návod na použitie:

Tento výrobok určený pre osobnú hygienu, je vyrobený z kvalitných zdravotne nezávadných materiálov. Pred každým použitím prepláchnite všetky časti súpravy prevarenou vodou alebo dezinfikujte slabým dezinfekčným roztokom určeným pre styk s pokožkou a sliznicami.

Súpravu zložíte tak, že k skladacej fľaši na roztok pripojíte spojovaciu hadičku, trysku a uzatvárací ventil.

Fľašu na roztok naplníte teplou vodou alebo klystírovým roztokom a zavesíte na vhodné vyvýšené miesto podľa Vášho uváženia.

Na ventil naskrutkujete vaginálny alebo rektálny nadstavec podľa úkonu, ktorý sa chystáte spraviť.