

Keď obdržíte posteľ, zodpovednosť za jej správne používanie s náležitou starostlivosťou prechádza na vás. Preto si pozorne prečítajte priložené pokyny a oboznámte sa s ich technickým vybavením, manipuláciou a používaním všetkých funkcií.

### Tento návod na použitie vás oboznámi s funkciami nemocničnej postele a navyše popisuje:

- ako nastaviť nemocničnú posteľ,
- ako ovládať nemocničnú posteľ,
- ako sa starať o nemocničnú posteľ a vykonávať jej údržbu.

Mechanická posteľ s dvoma funkciami polohovania

### Určené použitie

Táto posteľ je navrhnutá na polohovanie a prepravu pacientov, ako pomôcka pri liečbe a zmierňovaní chorôb alebo pri zranení či postihnutí.

### Funkcie

- **Funkcia zdvíhania opierky chrbta**
- **Funkcia zdvíhania nožnej časti**

### Záhlavie, nožné čelo

Štandardná verzia postele je vybavená odnímateľnými záhlavím a nožným čelom, aby sa poskytla lepšia prístupnosť k pacientovi. Záhlavie a nožné čelo sú vyrobené z modrej fólie z polypropylénu pomocou metódy vstrekovania.

### Bočnice

Posteľ je vybavená bezpečnostnými bočnými zábranami, ktoré chránia pacienta pred neúmyselným vypadnutím z postele. Bočnice sú vyrobené z nerezovej ocele a hliníkovej zliatiny.

### !! Riziko zachytenia a pomliaždenia !!

✳ **Pri spúšťaní bezpečnostných bočníc existuje riziko zachytenia alebo rozdrvenia končatín pacienta.**

✳ **Pred spustením bezpečnostných bočníc sa uistite, že končatiny pacienta nie sú v dráhe bezpečnostných zabradlí.**

### Kolieska

Posteľ je vybavená štyrmi uzamykateľnými kolieskami, ktoré je možné ovládať samostatne. Kolesá majú samostatnú brzdu s priemerom 125 mm a jednostranným tlmením.

### UPOZORNENIE

Vždy použite brzdy, keď posteľ nie je v pohybe alebo keď je pacient v posteli bez dozoru.

### Podvozok

Podvozok tvoria oceľové profily, ošetrené elektronickou práškovou farbou. Všetky povrchy sú bezpečné pre kontakt s pokožkou. Matrac je rozdelený na chrbtovú časť, sedáciu časť a nožnú časť. Chrbtová a nožná časť sa dajú nastaviť samostatne.

Riadiaci systém

Na konci postele sú nainštalované oceľové otočné páky, ktoré slúžia na ovládanie zdvihu chrbta a ohýbanie nožnej časti.

### Parametre

<b>Celková dĺžka postele</b>	208 cm
<b>Celková šírka postele</b>	96 cm
<b>Celková výška postele</b>	50 cm

Dĺžka ležiacej časti	196 cm
Šírka ležiacej časti	90 cm
Uhol naklápania chrbta	0-70°
Uhol naklápania nohy	0-30°
Nosnosť	260kg

### Upozornenia

- Táto posteľ môže byť prevádzkovaná iba osobami, ktoré dostali inštrukcie od prevádzkovateľa o jej bezpečnej prevádzke. Ak posteľ zmení majiteľa, musí byť spolu s ňou predaný aj návod na použitie.
- Po AKÝKOLVEK úpravách, opravách alebo servisných prácach a PRED použitím sa uistite, že všetok prídavný materiál je pevne utiahnutý - inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Ak máte podozrenie na akékoľvek poškodenie alebo poruchu, ihneď vyberte posteľ z prevádzky, kým nebude opravená alebo vymenená poškodená súčiastka!
- Táto posteľ nesmie byť upravovaná bez povolenia výrobcu.
- Efektívna a bezpečná prevádzka spolu s maximálnou ochranou pacientov môže byť zaručená iba vtedy, ak sa používa originálne príslušenstvo navrhnuté pre príslušný model posteľe

### Údržba, čistenie a kontrola

Údržbové a čistiace postupy by sa mali vykonávať aspoň raz ročne alebo podľa potreby. Odporúčame čistiť jednotku čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nepoužívajte nadmerné množstvo tekutiny ani drsné čistiace prostriedky.

- Utierajte posteľ dezinfekčným prostriedkom.
- Pred použitím ju nechajte úplne vyschnúť.
- Skontrolujte kolieska, aby ste sa uistili, že sú zabrzdené pokiaľ je to potrebné a že sa kolieska pohybujú správne.
- Skontrolujte všetky súčasti posteľe.
- Vizualne skontrolujte všetky zvárania a praskliny.
- Skontrolujte komponenty plošiny, či nie sú ohnuté alebo poškodené.
- Skontrolujte konce pohonu a jeho montážne hardvérové súčasti či nie sú ohnuté alebo nadmerné opotrebovanie.
- Skontrolujte všetky skrutky a úchyty.

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili matrac od slovenského výrobcu BENAB TRADE s.r.o. Naše matrace zodpovedajú najprísnejším požiadavkám na hygienu lôžka, sú dlhodobo testované a vyrábané z výhradne certifikovaných a zdravotne nezávadných materiálov.

Zodpovedajú najprísnejším požiadavkám na hygienu, kvalitu, komfort, funkčnosť lôžka a výnamne prispievajú k celkovej regenerácii organizmu počas spánku.

### **Rozdelenie matracov a vhodné použitie roštov:**

- pružinové, taštičkové - určené na pevný podklad, medzera medzi latami na rošte max. 6 cm

- penové - určené na použitie s predpätými lamelovými roštami medzera medzi lamelami na rošte max. 6 cm

### **Návod na použitie:**

Matrace sú výhradne určené pre lôžka a nie sú vhodné ako časti prevažne používané na sedenie. Aby sa zachovala tvarová stálosť matraca doporučujeme, aby matrac bol vložený do postele, kde výška bočníc je min 30% z hrúbky matraca. Pri položení hrubých pružinových matracov do postele nie sú nutné bočnice.

### **Výrobca zakazuje:**

Použitie matracov na iný podklad, ako je to určené pre daný druh - pozri základné rozdelenie matracov. Umiestňovať výrobok v blízkosti tepelného zdroja a vystavením priamemu slnečnému žiareniu. Akékoľvek ohýbanie matracov s pružinovým jadrom a penových matracov nad rámec povoleného uhla 35 stupňov. Vysávanie matracov silným vysávačom, mohlo dôjsť k vyťahovaniu vlákien klimatizačnej vrstvy. Mechanické prášenie matracov. Poťqh matraca neodierajte ostrou kefou, ani ostrými predmetmi. POužívanie matracov v nadmerne vlhkom prostredí a ich ukladanie na nepriedušný podklad.

### **Výrobca odporúča:**

Pravidelné vetranie matracov na vzduchu, nie na priamom slnku. Matrac otáčať ak je špecifikovaný ako matrac obojstranný 4x ročne v štyroch smeroch, zvýši sa tým životnosť matraca a kvalita spánku. Matrace používať výlučne s prestieradlom - zvýšite hygienu matraca, obmedzíte živnú pôdu pre roztoče a predĺžite životnosť povrchových textílii. Výrobca vyslovene odporúča z hygienického dôvodu používať chránič matraca!!!

### **Údržba matracov:**

Čistenie matracov je možné len so symbolmi uvedenými na všitej etikete. V prípade navlhnutého povrchu je nutné jeho dôkladné vysušenie na vzduchu. Pri dodržiavaní uvedených zásad Vám bude výrobok dlho slúžiť k Vašej spokojnosti. Výrobok bol pred expedíciou z výrobného závodu riadne prekontrolovaný, vyskúšaný a spĺňa po stránke konštrukčnej a kvalitatívnej všetky stanovené kritéria.

### **Výrobca na uvedený výrobok poskytuje nasledovné záruky:**

Informácie o dĺžke záruky sú uvedené v katalógových listoch, cenových ponukách, prípadne na predajnom doklade predajcu. V prípade ak nie je uvedená výnimka, platí štandardná záruka 2 roky.

### **Všeobecne o záruke:**

**Záruka sa týka** všetkých väd zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení výrobku. Pri reklamácii je potrebné predložiť pokladničný doklad (faktúru), a vyhotovenie fotodokumentácie od reklamovaného výrobku v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu výrobku zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujú u Vášho predajcu kde ste výrobok zakúpili. Pre uplatnenie reklamácie, treba uschovať obalový materiál (fóliu) pre prípadnú prepravu výrobku na opravu. Za preležanie matraca sa podľa ČSN 91 1004 považuje zmena výšky čalúnenia väčšia ako 13%, alebo zmena celkovej deformácie väčšej ako 35% celkovej výšky matraca. Všetky použité materiály počas používania prirodzene starnú a môžu meniť svoju tuhosť a pružnosť, preto zmena týchto parametrov nie je dôvodom na reklamáciu. Žmolkovanie látky je prirodzeným znakom používania matracov a u väčšine prípadov je dôvodom nevhodný výber postelnej plachty, preto nie je dôvodom výrobok reklamovať. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu farieb jednotlivých materiálov z technologického dôvodu a aj parametrovo zhodne peny nemusia mať vždy rovankú farbu. Súčasťou

jadra matraca môže byť technický spoj/zvlášť pri neštandardných rozmerov, ktorý nemá vplyv na funkčnosť a úžitkové vlastnosti matraca.

**Záruka sa nevzťahuje** na poškodenie ku ktorému došlo hrubým, alebo neodborným používaním, prípadne nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie. Ak výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa, alebo zlým skladovaním. Ak bol zašpinený a následne neodborne vyčistený.

Matrace sa nesmú používať v nadmerne vlhkom prostredí, alebo ukladať na nepriedušný podklad. Matrace je nutné pravidelne vetrať a matrace špecifikované ako matrace obojstranné je potrebné rovnomerne otáčať. Pleseň je dôsledkom nesprávneho vetrania matraca a preto nie je dôvodom k uplatneniu reklamácie výrobku. Po posúdení opodstatnenosti predmetu reklamácie bude vada odstránená príslušným spôsobom v zákonnej lehote. Tolerancia výrobných rozmerov podľa STN EN 1334 je +/- zo šírky a dĺžky, tolerancia hrúbky matraca je +/- 1cm, meraná v strede matraca a nie na jeho okraji. Z hygienických dôvodov prijímame do opravy len čisté a riadne zabalené výrobky. V prípade reklamácie prosíme kontaktujte Vášho predajcu, prípadne informujte u výrobcu.