



Invalidný vozík Unizdrav Basic

Manuál

Pred použitím si pozorne prečítajte manuál.



Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili invalidný vozík. Pred použitím si pozorne prečítajte užívateľskú príručku, aby ste sa oboznámili so správnou obsluhou a údržbou. Uložte si užívateľskú príručku na bezpečnom mieste.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	01
Použitie produktu a konštrukcia	01
Hlavné technické výkony	02
Názvy dielov	02
Inštalácia a aplikácia	03
Údržba.....	04
Špecifikácie	05

Bezpečnostné poznámky

Poznámka

- Brzdzenie je prísne zakázané počas pohybu. Ak nemáte sprevádzajúcu osobu, pevne uchopte ručné koleso a postupne zastavte.
- Nestojte na stupačkach. Inak môže dôjsť k prevráteniu invalidného vozíka.
- Bez súhlasu technika sú nepovolené akékoľvek úpravy prísne zakázané. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne nehody spôsobené takýmito úpravami.
- Nepredkláňajte sa počas pohybu. Inak môže dôjsť k ovplyvneniu stability počas jazdy.

Poznámka

- Je potrebné, aby bola sprevádzajúca osoba vždy blízko pri prvom použití invalidného vozíka.
- Nepredkláňajte sa, ak nie je nainštalované zariadenie proti prevráteniu.
- Nenechávajte invalidný vozík naklonený alebo zdvihnutý počas používania.
- Invalidný vozík by mal byť parkovaný na rovnej ploche.
- Držte pneumatiky ďalej od vykurovacích zariadení.
- Netlačte na rúrku opierky rúk, keď rozkladáte invalidný vozík.
- Nastaviteľná opierka na nohy by mala byť nastavená minimálne 50 mm nad zemou.
- Používajte invalidný vozík podľa predpisov o zaťažení (vrátane tovaru na vozíku), ktoré sú uvedené na ráme.
- Pred použitím správne nainštalujte zariadenie proti prevráteniu, ak je vozík vybavený týmto zariadením.

Použitie produktu a konštrukcia

- Tento výrobok je navrhnutý ako prostriedok prepravy pre osoby so zdravotným postihnutím, pacientov a starších ľudí.
- Tento výrobok sa skladá z rámu, priečnej tyče, opierky rúk, dosky opierky rúk, opierky na nohy, ručnej brzdy, držadla, predných koliesok, zadných kolies, brzdy, vankúša, operadla a ďalších súčastí.

Hlavné technické parametre

Minimálny polomer otáčania: 0,85 m

Minimálna šírka priestoru na otáčanie: 1,5 m

Celková dĺžka	100 cm
Celková dĺžka bez opierky na nohy	89 cm
Celková šírka	61,7 cm
Celková výška	89,5 cm
Šírka po zložení	28 cm
Šírka sedadla	48 cm
Výška sedadla	40cm
Šírka opierky	45cm
Výška opierky	45 cm
Priemer predného kolesa	17,78 cm
Priemer zadného kolesa Max.	60,9cm
Záťaž	100 kg

Názvy dielov



A	Predné kolieska	B	Stupačky
C	Podsedák	D	Laktová opierka
E	Rukoväť	F	Operadlo
G	Zadné koleso	H	Obruč
I	Ručná brzda		

Inštalácia a aplikácia

Rozloženie vozíka

- Uchopením rukoväte mierne oddelíte rám doľava a doprava. Konštrukciu sedadla zatlačte dlaňami dole. Invalidný vozík by sa mal otvoriť.

Poznámka:

Nepoužívajte silu na otvorenie operadla, aby ste predišli poškodeniu výrobku.



Sklopenie vozíka

- Vyklopte smerom hore plastové stúpačky.
- Zdvihnite sedadlo hore tak, že podložíte ruku pod sedačku. Priblížením krížovej konštrukcie sa vozík uzavrie.



Spôsob nastupovania alebo vystupovania

- Nasadnutie na vozík

Zablokujte kolesá. Potom sa pomaly s pomocou spoločníka držte za operadlo


a sadnite si do invalidného vozíka.

- Vysadnutie z vozíka

Zablokujte kolesá. Potom sa držte za lakťovej opierky a postavte sa s pomocou spoločníka.

Nastavenie opierok nôh

Nastavenie opierky nôh: Odskrutkujte obručovú maticu pomocou kľúča, potom ju nastavte do vhodnej polohy. (Obrázok 4)

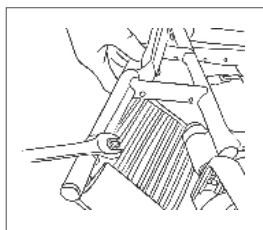

Obrázok

⚠ Pozor: Po nastavení by výška nemala byť menšia ako 50 mm.

Údržba

- Po určitom čase používania skontrolujte časti a skrutky invalidného vozíka. Pokiaľ dôjde uvoľnenie, upravte ho včas, aby ste predišli potenciálnemu bezpečnostnému riziku.
- Na zabránenie neefektívneho používania by sa pohyblivé časti mali každý týždeň mazať
- Po použití by sa povrch invalidného vozíka mal vyčistiť suchou a mäkkou handrou, aby sa predišlo hrdzaveniu.
- Držte vankúš a operadlo čisté, aby ste predišli infekcii pokožky.
- Invalidný vozík by mal byť umiestnený na suchom, vetranom a stabilnom mieste bez korozívnych plynov.
- Odpad by mal byť likvidovaný v súlade so všetkými platnými vládnyymi predpismi.

Symboly

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	HORE		KREHKÉ
	UDRŽUJTE SUCHÉ		VÝROBCA