

Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - biele

vyhotovenie



Návod na použitie



Dezinfekcia vzduchu - použitie:

Uzavretý germicídny žiarič UNIZDRAV UVC sa používa na dezinfekciu vzduchu v prítomnosti ľudí, čo znamená že je bezpečné sa pohybovať v blízkosti germicídneho žiariča. Na dezinfekciu prostredia sa používa germicídne žiarenie. Je to umelé žiarenie z UV časti spektra vo vlnovej dĺžke 253,7nm. Vďaka germicídnemu žiareniu sa naruší DNA bunkového zloženia mikroorganizmov, baktérií a vírusov, čím tieto mikroorganizmy rýchlo uhynú. Zariadenie sa používa na miestach, kde klasické metódy dezinfekcie nie sú účinné, alebo v prostredí, ktoré vyžaduje neustálu čistotu. Sklo či iné priehľadné plastové materiály neprepúšťajú UVC žiarenie.

Pre najlepší účinok germicídneho žiariča nechajte prístroj spustený nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni. Užívateľ si môže určiť vlastný čas prevádzky žiariča. Germicídny žiarič zapneme spínačom na zadnej strane. Keď predná strana žiariča svieti, žiarič je zapnutý. Ak predná nesvieti žiarič je vypnutý alebo nefunkčný.

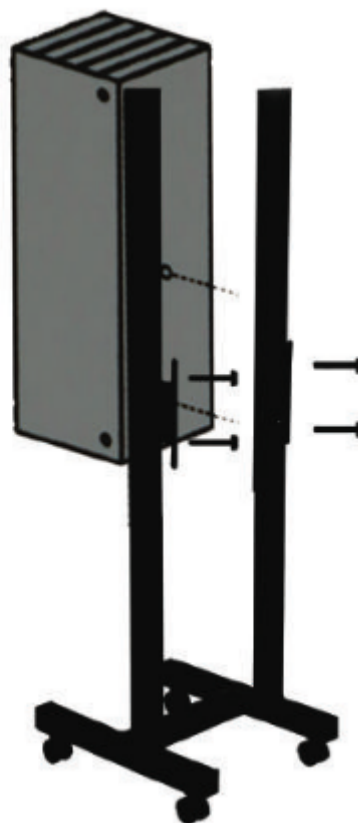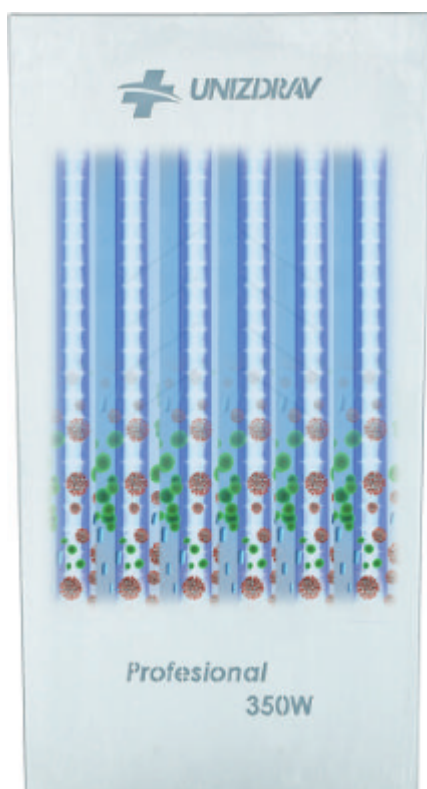

Montáž germicídneho žiariča:

Germicídny žiarič UNIZDRAV UVC z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom elektrickým prúdom je zariadenie triedy ochrany I. s krytím IP20. Montuje sa na stojan.

1. Po rozbalení jednotlivých komponentov, priskrutkujte podstavec k nosnej tyči.
2. Pomocou dvoch skrutiek priskrutkujte germicídny žiarič k nosnej tyči.
3. Pripojte napájací kábel ku germicídnemu žiariču a následne zapojte kábel do zásuvky.

Parametre:

celková výška: 1,45 m

výška stojana: 1,22 m

rozmer podstavca: 33x33 cm

Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - biele

vyhotovenie

Návod na použitie



Údržba:

Germicídny žiarič vyžaduje pravidelnú údržbu. Pri znečistení prachom pretrieme suchou handrou, pri inom znečistení použijeme čistiaci prostriedok na báze liehu. Germicídny žiarič obsahuje filter ktorý je potrebné vyčistiť alebo povysávať. Filter sa nachádza na spodnej a vnútornej strane žiariča. Preto je potrebné zložiť vrchný kryt. Údržbu vykonávame podľa vlastného uváženia a podľa prašnosti prostredia v ktorom sa germicídny žiarič nachádza. Na vyčistenie trubice použijeme suchú handru.

UPOZORNENIE: Neskladajte kryt z germicídneho žiariča ak je zariadenie zapnuté! Pred zložením krytu je potrebné žiarič vypnúť. Ak dôjde k mechanickému poškodeniu, je nutné urýchlene prístroj vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Následne kontaktovať predajcu.

Výmena trubice:

Akýkoľvek zásah do žiariča - či už pri výmene trubice alebo pri čistení zariadenia, je možný len po odpojení germicídneho žiariča z elektrickej siete. Po odstránení dvoch vrchných skrutiek predný kryt vyklopíme a môže dôjsť k výmene trubice, ktorú vysunieme smerom nahor. Nové trubice zasunieme do drážok v držiakoch trubíc. Predný kryt zdvihujeme, zaklopíme a poistíme dvomi skrutkami. Trubicu je potrebné vymeniť po dobe životnosti podľa použitého typu - doporučené trubice OSRAM PURITEC HNS L 36W - 16 000 hodín životnosť. Trubica aj po tejto dobe svieti rovnakou farbou/modro fialová/ a intenzita je opäť 100%. Nefunkčné, alebo zničené trubice je nutné likvidovať ako toxický odpad.

Záručné podmienky

Záruka na germicídny žiarič je 24mesiacov.

Nevzťahuje sa na časti, ktoré sú predmetom doby životnosti (**trubica , ktorej životnosť je 16 000 hodín /32 mesiacov**).

UPOZORNENIE:

Ak germicídny žiarič nefunguje a nemáte istotu že životnosť trubice skončila, skontrolujte na zadnej strane žiariča poistku ako aj správnu polohu vypínača. Spotrebič nemôžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak neboli náležite poučení.



hlavný vypínač, poistka, napájanie

Technické parametre: UNIZDRAV UVC

Napájanie: 220-240V/50Hz

Príkon: 300W (wattov), 1,3 A (ampérov)

Krytie: IP20

Zdroj UVC 90μW/sek/cm² 253,7nm, OSRAM PURITEC 36W HNS L

Množstvo ozónu: bezozónové

Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - biele vyhotovenie

Návod na použitie



Materiál: nerezová oceľ

Balenie: kartón/1 kus

Prevedenie pripojenia: pohyblivý prívod 2m

Výstraha:

POZOR! Nebezpečenstvo ultrafialového žiarenia! Po zložení krytu nebezpečenstvo poškodenia očí a pokožky. Nikdy neotvárajte kryt počas prevádzky germicídneho žiariča.