

Charakteristika

Kompaktný guľatý sprchovací stolček môže byť použitý buď v sprche, alebo vo vani, tiež vďaka malým mieram sa zmestí do malej miestnosti. Pomôcka je výškovo nastaviteľná, rám je vyrobený z hliníka s plastovým sedadlom.

Obsah balenia

1. Okrúhla sedačka (1x)
2. Vrchné nožičky (1x)
3. Spodné nožičky (1x)
4. Skrutky (5x)
5. Podložky pod skrutky 5x)

Návod na zostavenie

1. Položte sedačku na rovný povrch tak, aby vyrezávaná časť, do ktorej sa vkladajú nožičky bola otočená smerom hore.
2. Položte do vyrezanej časti najprv vrchné nožičky (vrchné nožičky sú tie, ktoré majú vo vrchnej časti rovnú plochu a z opačnej strany zaoblenú). Pridržiňte ich a položte na ne krížom spodné nožičky (spodné nožičky majú vo svojej vrchnej časti zaoblenú plochu a z opačnej strany rovnú). Prekrižte ich tak, aby bolo možné cez stred priskrutkovať 1 skrutku spolu s podložkou.
3. Zvyšné skrutky s podložkami prichyťte k sedadlu na všetky 4 nožičky.

Návod na použitie

Pred použitím pomôcky si pozorne prečítajte návod na použitie. V prípade pochybností týkajúcich sa použitia alebo vhodnosti výrobku, obráťte sa na predajcu alebo predpisujúcu osobu. Neprekračujte stanovenú maximálnu možnú hmotnosť užívateľa alebo maximálnu nosnosť pomôcky.

Zostavte výrobok podľa priloženého návodu na zostavenie.

Pred použitím výrobku skontrolujte, či je výrobok stabilný a pevný a či sú všetky skrutky dotiahnuté.

V prípade, že je výrobok poškodený alebo opotrebovaný, nepoužívajte ho. Ak potrebujete vymeniť opotrebované alebo poškodené časti kontaktujte svojho predajcu.

Neskladajte výrobok pri extrémnych teplotách alebo vonku.

Skontrolujte, či sú všetky nohy nastavené na rovnakú výšku.

Nastavenie pomocou uzatváracej spony: uistite sa, že spona správne uzaviera trúbku a že prechádza z jednej strany na druhú.

Nastavenie pomocou perového tlačidla: uistite sa, že tlačidlo vychádza úplne z trúbky.

Dávajte si pozor na klzké plochy. Užívatelia s obmedzenými fyzickými schopnosťami by mali požiadať o pomoc.

Pokyny na údržbu

Na čistenie pomôcky používajte bežné neabrazívne čistiace prostriedky. Poutierajte mäkkou handričkou do sucha. Ak pomôcku používa viac ľudí (napr. v ústavoch, v nemocniciach), postupujte pri dezinfekcii podľa pokynov hygienika.

Technické údaje

Farba biela

sedadla (priemer) 33 cm

Nastaviteľná výška 38 - 56 cm

Nosnosť 110 kg

Hmotnosť 1,5 kg

Madlo

Madlo slúži ako pomôcka pri vstávaní, sede a stojí v kúpeľni a WC. Upevňuje sa na stenu v kúpeľni a WC. Madlo je k dispozícii v 5 rôznych dĺžkach a môže byť namontované v akejkoľvek polohe. Je dodávané so 6 montážnymi skrutkami.

Dĺžka madla	Hmotnosť
30cm	0,4 kg
40 cm	0,5kg
45 cm	0,55kg
60cm	0,7kg
80 cm	0,8kg

Nosnosť: 100kg

Distribútor: www.unizdrav.sk

Špongia s predĺženou rúčkou

Špongia na umývanie má predĺženú rukoväť, ktorá umožňuje ľuďom s obmedzeným pohybom dostať sa aj na ťažko prístupné miesta ako sú chrbát alebo nohy.

Distribútor: www.unizdrav.sk

Dĺžka celková58 cm

Dĺžka držadla43 cm