

Návod na použitie - Toaletný vozík na kolieskach

Toaletný vozík je určený ku použitiu na pevnej, rovnej podlahe. Slúži výlučne k preprave jednej osoby.

Brzda nožná:

Na všetkých 4-roch kolieskach sú umiestnené brzdy. Pri zabrzdení zašliapnite plochu páčky brzdy na doraz, pri odbrzdení posuňte plochu páčky nohou dopredu na doraz.

Zaklapnutie:

Zašliapnite brzdú, zložte nohy zo stúpačky, stúpačku zaklopte až na doraz. Opierky lakťa je možné vyklopiť smerom nahor, čo prináša nasledovné výhody: jednoduchý prístup k stolu, ľahké nasadenie, vysadenie.

Zodvihnutie opierky lakťa:

Opierku vyklopte smerom nahor až na doraz.

Sedacia doska:

Je čalúnená, vhodná aj na prepravu pacienta.

Odobratie sedacej dosky:

Dosku odoberte zodvihnutím smerom nahor. Dosku položte na sedačku, fixačný kolík pod doskou zapadne do oválneho otvoru v sedačke. Toaletná nádoba má ergonomický tvar, je vyrobená z príjemného materiálu, opatrená vodiacou lištou, ľahko odnímateľná. Toaletnú nádobu zasuňte zozadu do vodiacej lišty pod sedačkou. Prednú hranu sedačky vytiahnite zo svoriek smerom nahor, sedačku zodvihnite a zoberte. Zadnú hranu sedačky s vykrojenými rohmi nasuňte až k operadlu, prednú zaoblenú hranu stlačte na doraz, sedačka musí zapadnúť.

Ošetrovanie:

Po každom použití toaletnej nádoby je nutné nádobu a sedačku dôkladne vyčistiť a dezinfikovať. Používajte bežné dezinfekčné prostriedky. Na toaletný vozík používajte mydlový roztok. Poťah sedadla a opierky chrbta čistite teplou vodou, prípadne s pridaním bežného pracieho prostriedku. Plastové diely čistite teplou vodou s pridaním bežných saponátov.

Technické údaje

Rozmer sedadla (šírka x hĺbka x výška) 45 x 43 x 49

Celkový rozmer (dĺžka x šírka x výška) 84 x 57 x 95

Hmotnosť 12,4 kg

Nosnosť 130 kg

Farba konštrukcie strieborná