

FIAB - OS/12A

Pre terapeutickú aplikáciu kyslíka nosom.

**Inštrukcie k použitiu:** Kyslíkový zdroj musí spĺňať platné predpisy, zariadenie musí byť zapojené a aktivované kvalifikovanou osobou. Presvedčte sa, že je hadička bezpečne pripojená ku zdroju kyslíka, pripojte druhý koniec hadičky k maske, nastavte prietok kyslíka podľa inštrukcií lekára. Zavedte opatrne každú koncovku zvlášť do nosnej dierky. Nastavte správnu polohu koncoviek. Ľavú a pravú hadičku vedte nad čelúťou nad obe uši a temeno hlavy. Nastavte spojenie oboch hadičiek pomocou plastového krúžku. Pripojte koniec oboch spojovacích hlavičiek ku zdroju kyslíku. Zariadenie je na jedno použitie a môže byť kontinuálne používané po dobu max. 30 dní. Upozornenie - jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane - riziko nákazy resp. zhoršenia zdravotného stavu.

**Skladovanie:** 0 - 50 stupňov Celzia, max. 80% vlhkosť.

**Likvidácia:** Vid príslušné platne zákony o likvidácii odpadu v súlade s nariadením EEC 93/42 - 2007/47/CE