

Toaletné kreslo nepojazdné s vyššou nosnosťou

Návod na použitie

Pred použitím pomôcky si pozorne prečítajte návod na použitie. Neprekračujte stanovenú maximálnu možnú hmotnosť užívateľa alebo maximálnu nosnosť pomôcky.

Návod na zostavenie

Kreslo vyberte z krabice na rovný povrch.

Pripevnite chrbtovú opierku na kreslo zasunutím opierky do otvorov na sedacej časti a zatlačte opierku tak, aby fixačné gombíky zapadli do otvorov. Lakťové opierky upevnite do otvorov na konštrukcii zdvihnutím z dola nahor, až kým ich konštrukcia nezapadne na miesto. Lakťové opierky opätovne sklopte zatlačením na páčku, ktorá sa nachádza na zadnej strane opierok konštrukcie.

Vedierko vložte pod sedák z prednej strany kresla. V prípade potreby si nastavte výšku nožičiek a zafixujte ju pomocou fixačných gombíkov.

Kreslo je tak pripravené k použitiu.

Pokyny na údržbu

Na čistenie pomôcky používajte bežné čistiace prostriedky. Poutierajte mäkkou handrou do sucha. Ak pomôcku používa viac ľudí (napr. v ústavoch, v nemocniciach), postupujte pri dezinfekcii podľa pokynov hygienika.

Technické údaje

Technické parametre:

Celková výška od zeme po opierku	79 - 89 cm
Výška sedadla od zeme	50 - 60 cm
Celková dĺžka	52 cm
Šírka sedadla	60 cm
Hĺbka sedadla	47 cm
Celková šírka kresla	73 cm
Šírka medzi podrúčkami	65 cm
Šírka a hĺbka otvoru	20,5 - 25 cm
Nosnosť	290 kg
Hmotnosť	11 kg